

## COOLITE PRO

<b>LUGAR DE FABRICACIÓN</b>	China - GSD	
<b>DESCRIPCION DEL EQUIPO</b>	Primer equipo de depilación láser diodo con fibra óptica. Equipo compuesto por la estructura principal, handpiece, pedal y cable de alimentación. El generador láser se encuentra en el equipo y no en el handpiece, de esta manera proporciona menor peso y mayor comodidad.	
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	Tipo de láser	Láser Diodo
	Longitud de onda	810 nm
	Potencia del láser	400 W
	Tamaño spot	12 x 12 mm
	Ancho de pulso	10 ms - 850 ms
	Densidad de energía	1 - 100 J/cm <sup>2</sup>
	Enfriamiento	Por contacto, puntera de Zafiro
	Dimensiones	50 x 38 x 35 cm
	Peso	22 Kg
<b>MECANISMO DE ACCION</b>	Melanina presente en el pelo recibe la mayor parte de energía liberada, elevando su temperatura más rápido que la piel de su alrededor. La captación de energía por el pelo es transmitida a las paredes del folículo piloso, matriz y papila que acaban siendo destruidos, eliminando la posibilidad de generar un nuevo pelo	
<b>INDICACIONES</b>	Depilación e inhibición del crecimiento de pelos oscuros no deseados, excepto cejas, pestañas y áreas mucosas	
<b>MODALIDAD DE PROGRAMACION</b>	Modo Rápido	Áreas grandes
	Modo Libre	Áreas pequeñas
<b>CONTRAINDICACIONES</b>	Medicamentos fotosensibles o isotretinoína < 6 meses Pelo blanco Enfermedad cardíaca o diabetes descompensada Piel bronceada / Exposición al sol Embarazo - Lactancia	
<b>TRATAMIENTO</b>	3 a 6 sesiones. Intervalos de sesión cada 30 a 45 días.	
<b>GARANTIA</b>	2 años o 25.000.000 de disparos	
<b>ACCESORIOS</b>	1 Lente de protección paciente 1 Lente de protección operador 2 llaves de seguridad 1 Cable de energía 1 Pedal 1 Recipiente para inyección de agua 1 Manual de operación	